



מכשיר לשאיבת נזלת לתינוק הוראות הפעלה

הרכב המוצר

● אביזרים: 2 פיות יניקה ניתנות לפירוק



● יחידת ראשית



מיועד במיוחד לחללים הפנימיים של חלל האף לניקוי הפרשות סמיכות.
יש לבחור פיית יניקה מתאימה לפי גודל נחיריו של התינוק.

הוראות שימוש והפעלה

שים לב: בעת ניקוי האף, אם תיבת האיסוף מלאה ביותר מחצי, יש לרוקן ולנקות אותה לפני המשך השימוש, אחרת ההפרשות עלולות לזרום חזרה, מה שיקשה על הניקוי לאחר מכן.

תזכורת: למניעת זיהומים חיידקיים, יש לחטא את פיית היניקה ותיבת האיסוף במים חמים או באדים לפני השימוש. אין להשתמש במיקרוגל לחיטוי. אם שוטפים את החלקים הנשלפים במדיח כלים, הטמפרטורה לא תעלה על 100 מעלות צלזיוס (212 פרנהייט).

אזהרה: היחידה הראשית אינה עמידה למים. אין לשטוף במים או לנקות בתנאי חום גבוה. יש לנקות בעזרת מטלית רכה בלבד.

תזכורת: לאחר השימוש, יש לשטוף את פיית היניקה, מיכל האיסוף וכו' במים כדי למנוע התרבות חיידקים.

הוראות הפעלה

אופן השימוש בפעם הראשונה:

יש לטעון את המכשיר במלואו לפני השימוש בו בפעם הראשונה.

1. הדלקה/כיבוי: לחיצה ארוכה על כפתור ההפעלה למשך שנייה תפעיל את המכשיר בעוצמה הראשונה. לחיצה נוספת תעביר לעוצמה השנייה, ועוד לחיצה לעוצמה השלישית. לחיצה ארוכה נוספת תכבה את המכשיר. הפעולה מחזורית.
2. כוונן עוצמת היניקה: לחיצה על מתג הכוונן תעביר בין דרגות עוצמה מ-1 עד 5 במחזוריות.
3. טעינת המכשיר: חבר את כבל ה-USB לזרם של 5V 1A לטעינה. בעת טעינה: נורית אדומה כאשר הטעינה מלאה: נורית ירוקה יש לבדוק מידי פעם את הפילטר הספוגי ובמידה והפילטר התלכלך יש להחליפו בחדש.

אזהרות: מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם העדר ניסיון וידע, אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ע"י אדם האחראי לבטיחותם. ילדים צריכים להיות תחת השגחה כדי להבטיח שהם לא משחקים עם המכשיר. בכל מקרה של כאב או אי נוחות במהלך השימוש, הפסק את השימוש מיד ופנה לטיפול רפואי.

יבואן: מ. פיינגרש ושות' בע"מ

רח' דותן 2, יבנה, טל': 08-9999399

יצרן: הייטק בלוסקאי - סין

