



הוראות שימוש

אירוסול צ'אמבר

מרחיב (ספייסר) לשאיפת תרסיס




יבואן: מ. פיינגרש ושות' בע"מ
רח' דותן 2 יבנה טל: 08-9999399
המרכז למוצרים רפואיים ואורטופדיים


MF
Since 1968

אופן השימוש במרחיב (Spacer) לשאיפה של תרסיס

1. בדקו היטב את המוצר, וודאו כי לא קיימים נזקים, חלקים חסרים או גופים זרים. טרם השימוש הסירו כל גוף זר מהמכשיר.

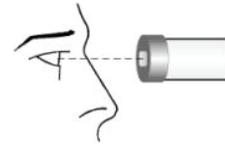


2. הסירו את המכסה מהמרחיב (במידה וקיים) והניחו את מחבר המסכה מעל פיית הפה עד שיתחבר היטב.

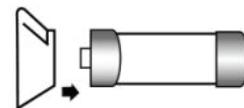


זהירות

לפני תחילת השאיפה, ודאו שכל החלקים מחוברים היטב זה לזה - חיבור רופף עלול לגרום למתן מינון לא מספק.

3. הסירו את מכסה המשאף (MDI), נערו היטב והכניסו מיד לחלק האחורי של המרחיב. טרם השאיפה, וודאו כי כל החלקים מחוברים היטב זה לזה, חיבור רופף עלול לגרום להעברה חסרה של המינון.

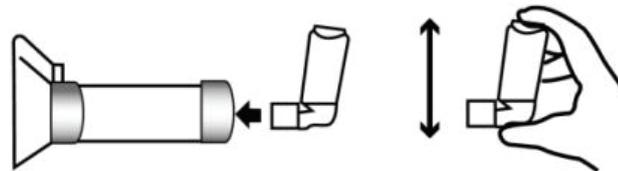

4. נשפו החוצה, הניחו את המסכה על הפנים, לחצו על המשאף והוציאו שאיפה באיטיות. המשיכו להחזיק את המסכה במקומה ונשמו פנימה והחוצה דרך המרחיב כ-5-6 נשימות. במידה ונשמע צליל, האטו את קצב השאיפה.

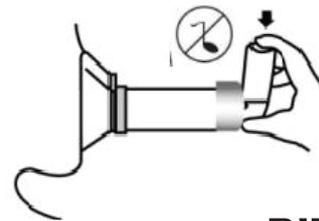

זהירות

אם אתם משתמשים במסכה, ודאו שהיא מכסה לחלוטין את הפה ואת האף. כיסוי חלקי עלול לגרום לדליפת התרופה וליעילות מופחתת של הטיפול. לתופעות לוואי אפשריות כתוצאה מחשיפה לאירוסול דולף - עיינו בעלון לצרכן של התרופה.

זהירות


מינון עבור ילדים עד גיל 18 חודשים 4-6 שאיפות, ילדים מעל גיל 18 חודשים 2-4 יצרכו 2-4 שאיפות עמוקות מבוגרים יכולים לשאוף שאיפה אחת עמוקה על מנת לסיים את המנה מהמכשיר.

5. במידה והרופא רשם לכם מינון של יותר מתרסיס אחד, המתינו דקה בין שאיפה לשאיפה ואז חזרו על שלבים 4-5.

אופן ניקיון המרחיב לשאיפת תרסיס (Spacer)

יש לנקות את המוצר, כל הרכיבים והאביזרים הנלווים באופן קבוע ובפרט כאשר הם נראים מלוכלכים – יש לנקותם מיד לאחר השימוש.

1. הסירו את החלק האחורי של המכשיר ופרקו את שאר חלקי המרחיב.

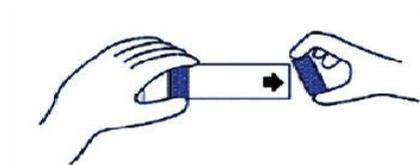

2. השרו את החלקים למשך 15 דקות במים פושרים עם נוזל ניקוי עדין. נערו בעדינות את המים כדי לסייע בהסרת שאריות.




3. שטפו היטב את החלקים במים נקיים.




4. נערו בעדינות את החלקים כדי להסיר עודפי מים. אין לנגב את החלקים במגבת – כדי למנוע היווצרות חשמל סטטי.



5. הניחו לייבוש באוויר במיקום אנכי (למשל על מתקן ייבוש כלים).

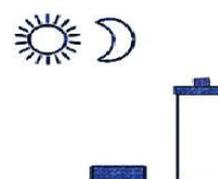

6. הרכיבו מחדש את המרחיב רק כאשר כל החלקים יבשים לחלוטין ומוכנים לשימוש.

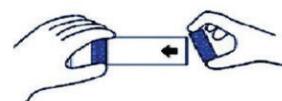

באישור משרד הבריאות, אגף ציוד רפואי, מספר אישור 25010021.
יצרן: ננטונג קאנגג'ינצ'ן מדיקל אקוויפמנט בע"מרחוב ג'נאן 10, ננטונג, מחוז ג'יאנגסו 226000 סין
יבואן ובעל הרישום: מ. פיינגרש ושות' בע"מ, דותן 2 יבנה. טל: 08-9999399.